

水口稔之先生ご考案のダイヤモンドバーがバージョンアップして新登場！！

M・サージカルダイヤモンドバー Version 2

側方への骨切削が可能のため、インプラントホール形成時の利便性に優れたダイヤモンドバー



M・サージカルダイヤモンドバーは切削性、耐久性に優れていると共に、20万回転での観測結果、回転精度（振れ値）3ミクロン以下のため顎骨に余分な振動を与えません。

M・サージカルダイヤモンドバーの適応例

通常のインプラント用のドリルは縦方向に切削するように設計されています。しかし、実際のオペでは横方向へ切削したい場面にしばしば遭遇します。

ファーストドリルでは真っ直ぐに形成したものの、セカンドドリルで骨の軟らかい部分に向かって流され曲がってしまい、形成したホールの角度修正を行ないたい場合、ダイヤモンドバーを用いると横に削ることができます。

抜歯即時などで斜面にドリリングしなければならない時、斜面のドリリングは滑って難しいものですが、ダイヤモンドバーで凹みをつけると、ファーストドリルによるドリリングが容易になります。



サイズ	セット内容	商品コード	価格
S	全長 28.0mm		
径	ø2.0 ø2.6 ø3.1 ø3.3 ø3.7		
Sセット	ø2.0/ø2.6/ø3.1/ø3.3/ø3.7 各1本	130-051 S	5本セットで 25,000円 (税抜)
Lセット	ø2.0/ø2.6/ø3.1/ø3.3/ø3.7 各1本	130-051 L	

※セット販売のみとなります。

販売名: M・サージカルダイヤモンドバー クラス分類: 一般医療機器 製造販売業者: 株式会社プラトンジャパン 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10081JP0002

<http://www.platonjapan.co.jp>
PLATON JAPAN

TEL : 0120-36-8950
FAX : 0120-36-8952

本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル
TEL: 042-734-8088 (代) FAX: 042-734-1109

営業所 名古屋・大阪・九州



0120-36-8952

下記部分に必要な事項をご記入の上、FAXにてお送りください

M・サージカルダイヤモンドバー Version2 FAX注文書



〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル TEL0120-37-6705

貴医院名および お電話番号		注文日	/
		希望納期	/ AM・PM
	TEL	休診日	

M・サージカルダイヤモンドバーVersion2（1箱5本入り）25,000円

サイズ	セット内容	商品コード	数量
Sセット	φ2.0/φ2.6/φ3.1/φ3.3/φ3.7 各1本	130-051S	
Lセット	φ2.0/φ2.6/φ3.1/φ3.3/φ3.7 各1本	130-051L	

※セット販売のみになります。単体販売はございません。

※平日のPM5時までのご注文は、基本的に当日発送させていただきます。（土日祝祭日を除く）

※表示価格は全て税抜価格です。