


## ドリルのレーザーマーク変更について

ドリルのレーザーマーク(深度目盛り)を変更しています。最も使用頻度の多いインプラントの長さ 10mm~12mm の間を太いマーキングで示しています。  
尚、製品は順次切り替えとなりますので、ご了承下さい。

<インプラントドリル>

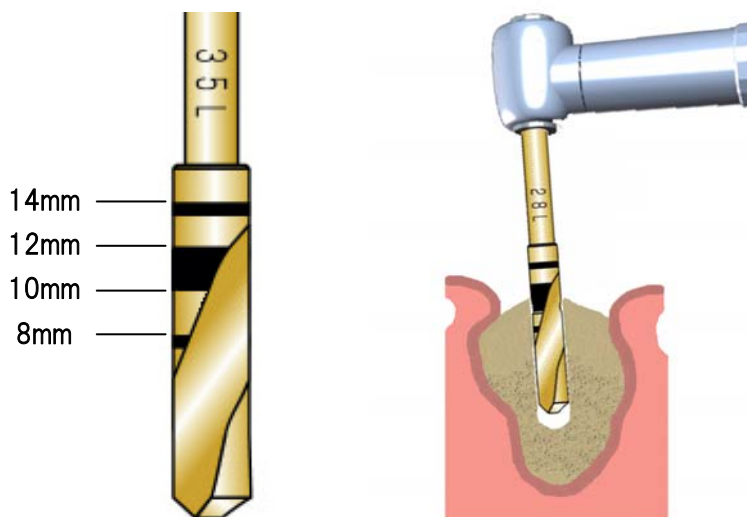

### ⚠️ ご注意

- ◎手術中は使用したドリルは必ず生理食塩水を入れたフレザートルなどに入れて付着した血液の凝固を防いでください。
- ◎手術後の洗浄は、ブラシによる血餅及び骨片の除去、防錆効果のある薬剤による(超音波)洗浄、精製水によるすすぎ洗浄を必ず行ってください。
- ◎本製品はチタンコーティング(TiN)処理を行っているため、洗浄時は他の外科器具と分別して行き、また錆びの発生を防ぐために保管時には確実に乾燥させるようにして下さい。

 PLATON JAPAN

株式会社プラトンジャパン