

新製品のご案内

プラットホームリーマ

医療機器製造販売届出番号 13B2X10012000008

Type "Pro" の2次手術時に、インプラントのプラットホーム上の余分な周囲骨を取り除くためのツールです。



(セットスクリュー附属)

	プラットホームリーマ 4.1	プラットホームリーマ 5.0
適応ボディ	Type 3.3・3.8	Type 4.7
商品コード	PFRP-410	PFRP-500
価格	12,800円/1本	


[全長] 11.6 mm

[材質] ステンレス製

TiNコーティング

～使用方法～

- 顎骨内のインプラントボディに附属のセットスクリューをヘックドライバーで装着します
- セットスクリューにプラットホームリーマを貫通させ、ラウンドドライバーを使用して時計方向に回転させ、プラットホーム上の骨を除去します。
- インプラントボディからセットスクリューを解除し、ヒーリングアバットメントを装着します。

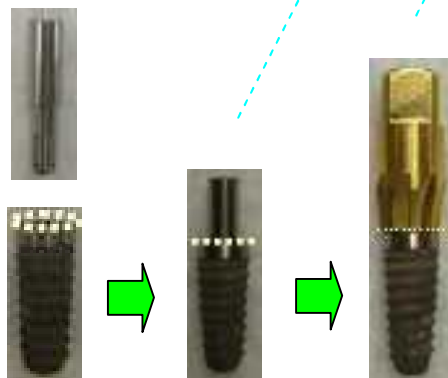

⚠️ ご注意

本品はプラトンインプラント Type 専用です。
埋入されたインプラントのサイズに合わせて
4.1 5.0 から選択して下さい。