

第9章 2次外科手術について

1. ヒーリングアバットメントの種類

2回法を選択した場合、オッセオインテグレーションの獲得後、骨内に埋入されているインプラントと粘膜貫通部となるアバットメントを連結するために、2次手術を行います。2次手術に使用するパーツは、「ヒーリングアバットメントφ4.0」、「ヒーリングアバットメントφ5.5」、「ヒーリングキャップPro B PFφ4.1」、「ヒーリングキャップPro B PFφ5.0」又は「延長キャップ」となります。


ヒーリングアバットメントφ4.0

φ4.0 mmサイズの2次手術後から粘膜治癒期間用のパーツです。




ヒーリングアバットメントφ5.5

φ5.5 mmサイズの2次手術後から粘膜治癒期間用のパーツです。

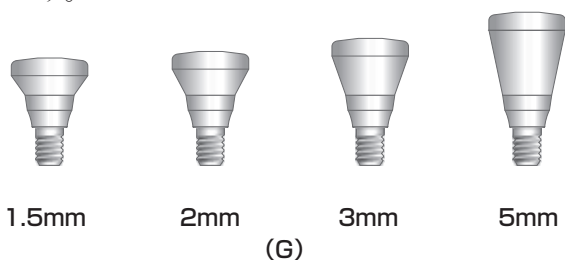


ヒーリングキャップ Pro B φ4.1


TypeIV Proのプラットホーム (PF) φ4.1を有するインプラント (φ3.3、φ3.8) の専用パーツです。プラットホーム (PF) とは、バットジョイントとなるため補綴物をフィクスチャーマージン (FM) に設定できます。

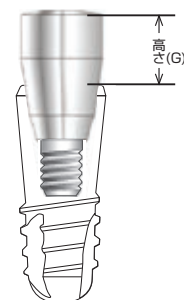

材質：チタン製

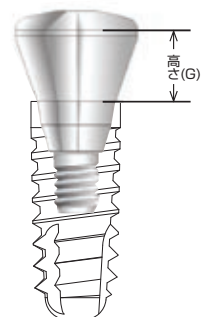


材質：チタン製

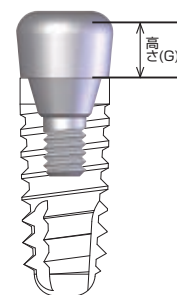

材質：チタン製

ヒーリングキャップ Pro B ϕ 5.0


Type IV Proのプラットホーム (PF) ϕ 5.0を有するインプラント (ϕ 4.7) の専用パーツです。プラットホーム (PF) とは、バットジョイントとなるため補綴物をフィクスチャーマージン(FM)に設定できます。

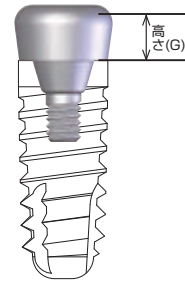

材質：チタン製

延長キャップ


適応として Type I、II のプラットホーム (PF) ϕ 4.4 を有するインプラント専用のキャップです。

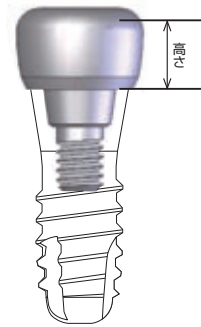

材質：チタン製

ワイド延長キャップ

適応として Type I、II の ϕ 4.5、 ϕ 5.0、 ϕ 6.0 ワイドタイプインプラント専用のキャップです。

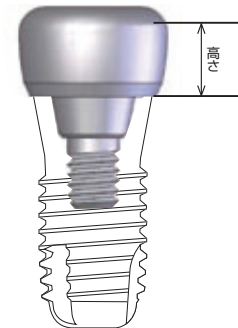

材質：チタン製

プラットホームリーマ

Type IV Proの2次手術時にインプラントのプラットホーム上の余分な周囲骨を取り除くためのツールです。



2. ヒーリングアバットメントの選択指標

粘膜貫通部が付与されているアバットメントに対応するヒーリングアバットメントを下記の関連表を参考に選択してください。

補綴様式	アバットメント	ヒーリングアバットメント
セメント固定方式	AMヘッドφ4.2	φ 4.0
	AMヘッドφ5.5	φ 5.5
	AMアングルヘッド	φ 5.5
	AMアングルヘッドPro	φ 5.5
	トランスファーヘッドProφ4.2	φ 4.0
	トランスファーヘッドProφ5.5	φ 5.5
	AMプレパレーションヘッド	φ 5.5
	AMプレパレーションヘッドPro	φ 5.5
スクリュー固定方式	AMクワトロヘッド	左記のアバットメント+クワトロヒーリングキャップ
マグネット固定方式	キーパーヘッド	左記のアバットメント



【例 1】：AMヘッドφ4.2G3.0を使用する場合
ヒーリングアバットメントφ 4.0 / 3mm



【例 2】：AMヘッドφ5.5G3.0を使用する場合
ヒーリングアバットメントφ 5.5 / 3mm

Version 3

ご注文または製品、その他に関するお問い合わせ

TEL 0120-36-8950 FAX 0120-36-8952

E-mail: support@platonjapan.co.jp

プラトンインプラントシステム
サージカルマニュアル Version 3
定価 4,500 円 (税込)



株式会社プラトンジャパン

<http://www.platonjapan.co.jp/>

本社	〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル	TEL 042-734-8088(代)	FAX 042-734-1109
西日本支社	〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目 17 番 18 号 (新大阪ビル東館 3F)	TEL 06-6325-8913	FAX 06-6325-8909
名古屋営業所	〒465-0014 愛知県名古屋市名東区上菅 2-613-105	TEL 052-778-0039	FAX 052-778-0039
北海道営業所	〒063-0006 北海道札幌市西区山の手六条 1 丁目 2-27-101	TEL 011-616-7222	FAX 011-616-7272
九州営業所	〒830-0016 福岡県久留米市通東町 7-27 みついビル 1F	TEL 0942-36-2544	FAX 0942-36-2544
プラトンテクニカルセンター	〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56	TEL 042-737-3580	FAX 042-734-1109