


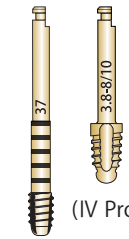
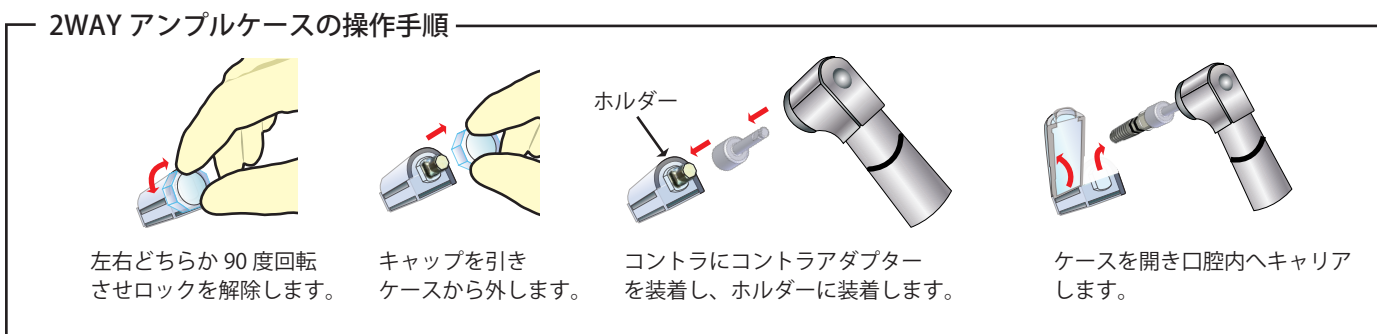


コントラ埋入システム

コントラアダプター	ボックスドライバー	コントラドライバー	コントラタッピング																																
 <p>コントラハンドピースを用いてインプラント体を埋入するジグです。</p> <p>CAAD-0000 ¥9,000</p>	 <p>コントラハンドピースを使用してインプラント体からホルダーを解除するジグです。</p> <p>CAUD-0000 ¥8,000</p>	 <p>封鎖スクリューをコントラハンドピースを使用してインプラント体に装着するインストゥルメントです。</p> <p>サイズ S CA400-000S L CA400-000L ¥6,900</p>	 <p>Type I、II、および TypeIV Pro のコントラハンドピース用タップ形成インストゥルメントです。</p> <p>骨質の硬いケースなどではタップを形成することによりインプラント体の挿入抵抗を最小限に抑えることが可能です。</p> <p>(I、II)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>コード No.</th> <th>価格</th> <th>サイズ</th> <th>コード No.</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ3.3</td> <td>CA171-0330</td> <td rowspan="6">¥11,000</td> <td>3.3-8/10</td> <td>CA171-3308</td> <td rowspan="6">¥11,000</td> </tr> <tr> <td>φ3.7</td> <td>CA171-0370</td> <td>3.3-12/14</td> <td>CA171-3312</td> </tr> <tr> <td>φ4.0</td> <td>CA171-0400</td> <td>3.8-8/10</td> <td>CA171-3808</td> </tr> <tr> <td>φ4.5</td> <td>CA171-0450</td> <td>3.8-12/14</td> <td>CA171-3812</td> </tr> <tr> <td>φ5.0</td> <td>CA171-0500</td> <td>4.7-8/10</td> <td>CA171-4708</td> </tr> <tr> <td>φ6.0</td> <td>CA171-0600</td> <td>4.7-12/14</td> <td>CA171-4712</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ	コード No.	価格	サイズ	コード No.	価格	φ3.3	CA171-0330	¥11,000	3.3-8/10	CA171-3308	¥11,000	φ3.7	CA171-0370	3.3-12/14	CA171-3312	φ4.0	CA171-0400	3.8-8/10	CA171-3808	φ4.5	CA171-0450	3.8-12/14	CA171-3812	φ5.0	CA171-0500	4.7-8/10	CA171-4708	φ6.0	CA171-0600	4.7-12/14	CA171-4712
サイズ	コード No.	価格	サイズ	コード No.	価格																														
φ3.3	CA171-0330	¥11,000	3.3-8/10	CA171-3308	¥11,000																														
φ3.7	CA171-0370		3.3-12/14	CA171-3312																															
φ4.0	CA171-0400		3.8-8/10	CA171-3808																															
φ4.5	CA171-0450		3.8-12/14	CA171-3812																															
φ5.0	CA171-0500		4.7-8/10	CA171-4708																															
φ6.0	CA171-0600		4.7-12/14	CA171-4712																															



エンジン設定の目安

	回転数	トルク値
インプラントフィクスチャー埋入	24rpm 以下	45Ncm 以下
タップ形成	24rpm 以下	30Ncm 以上 40 ~ 50Ncm 以下
封鎖キャップ装着	24rpm 以下	10Ncm 以下
インプラントホルダー解除	24rpm 以下	25Ncm 以上

