

外科補助器具

ご提案

■ SCA KIT — ソケットリフト用キット(クレストルアプローチ)

■ SLA KIT — サイナスリフト用キット(ラテラルアプローチ)

■ Fixture Remover — インプラント摘出キット

■ Screw Remover — スクリュー摘出キット

■ BENEX2 — 低侵襲抜歯器具

■ ECR — イージークラウンリムーバー

■ iBrush — インプラント周囲炎用ブラシ


ソケットリフト用キット SCA KIT Sinus Crestal Approach

従来のオステオームを用いたソケットリフトでは、槌打操作による患者への大きな負担が欠点でしたが、独自開発のドリルツールを採用した“SCA KIT”をご使用して頂くことにより、上顎洞粘膜に損傷を与えることなく、この方法を行うことができます。

- 特別にデザインされたブレードを持つリーマー“S-Reamer”と、1mmステップの“Stopper”によって上顎洞粘膜にダメージを与えることなく、安全な手術を行うことができます。
- S-Reamerを使用することにより、通常800-1200rpmのドリリングスピードにて穿孔操作ができます。
- SCAキットの使用方法は非常にシンプルで、またオステオームテクニックと違い、患者さんに不快さを与えることもありません。



FO001-0000
キット標準価格 ¥198,000(税抜)

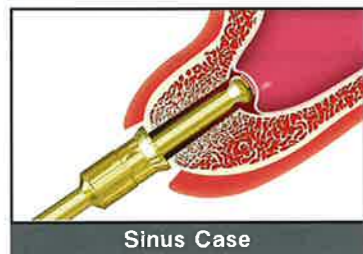


サイナスリフト用キット SLA KIT Sinus Lateral Approach

他のテクニックと比較して、より簡単でかつ安心して使用することができます。クレストラルアプローチでは膜を裂開させてしまう可能性のある残存骨高径の薄い症例では、このキットを使用することで全てのリスクが解決されます。加えて、“SLA KIT”は最小限のフラップで済みます。

SLAキットは、上顎洞粘膜にダメージを与えることなく、より安全に、かつ迅速・シンプルに、ラテラルから開窓できるようにデザインされた、新しい手術器具です。大きなフラップ、開窓、ストレートハンドピースやラウンドバー使用の難しさ、動脈からの出血、膜の裂開、腫脹および疼痛といった従来のラテラルアプローチのさまざまな問題を、このSLAキットでは解決できます。



FO002-0000
キット標準価格 ¥198,000(税抜)

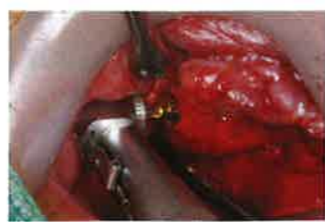


インプラント摘出用キット Fixture Remover

感染や炎症等の理由により摘出する必要のあるフィクスチャ(インプラント体)を、周囲骨への侵襲を最小限に抑え、オッセオインテグレーションを壊してフィクスチャだけを摘出するリムーバーキットです。




- 摘出のためのボーンロスは最小限に抑えられます。
- HEXのような接合部分が埋入時の過剰なトルクによりダメージを受け、他のツールでは摘出が困難な場合でも、シンプル操作で摘出が可能です。
- しっかりとオッセオインテグレーションしているインプラントでも摘出できます。
- 摘出時の耐久トルク値は、400Ncmまでです。
- トレフィンバーを使う必要はありません。
- 多くの種類のインプラントに適用可能です。

※フィクスチャの種類により使用できないものもありますので、ご注意ください。
また、強固なオッセオインテグレーションの場合には、摘出不可能な場合もあります。

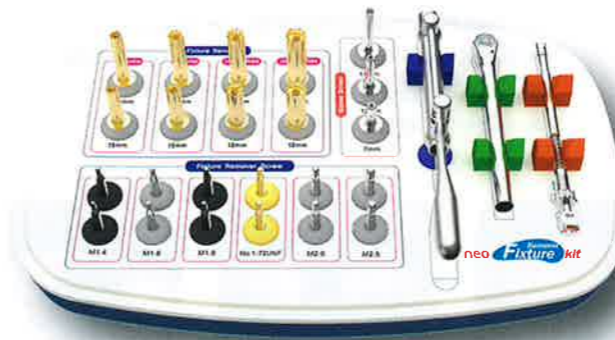

FO003-0000
キット標準価格 ¥158,000(税抜)


使用手順

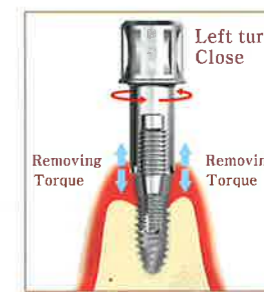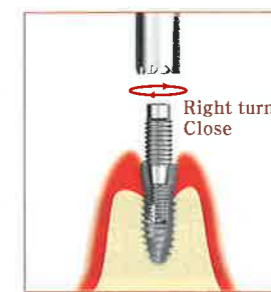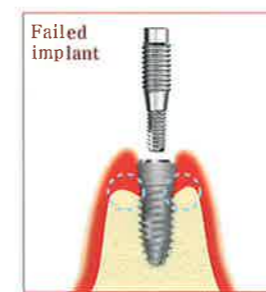

スクリュー摘出用キット Screw Remover Kit




フィクスチャ(インプラント体)とアパットメントを締結させるスクリューが、術中または術後に破折した場合に、フィクスチャ内部のネジ溝を傷つけることなく摘出するリムーバーキットです。

- 付属の4種類のGuide(いずれかを選択)で、正確に破折スクリュー上にドリリングするため、フィクスチャ内部を傷つけることがありません。
- メーカーを問わず、多くのインプラントシステムに適用できます。

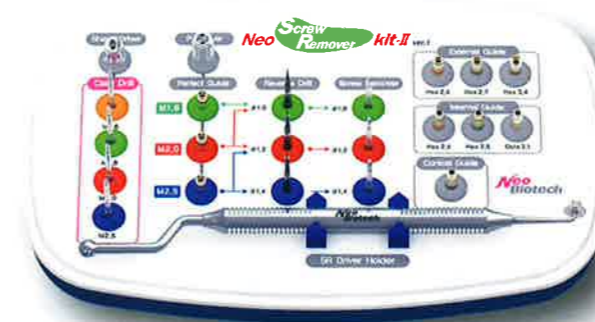

FO004-0000
キット標準価格 ¥198,000(税抜)

使用手順

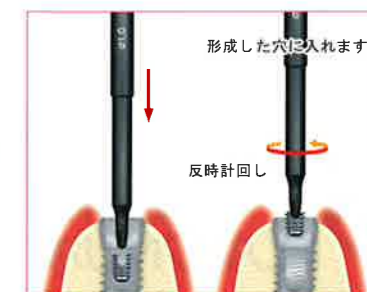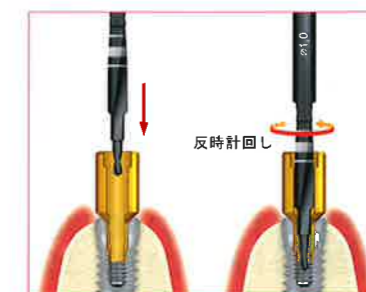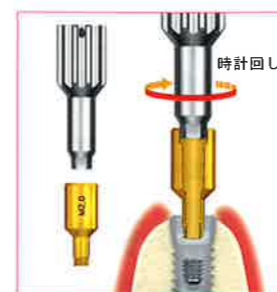

Benex® II

Pat.No. CH 696-458



新感覚の抜歯器具

ヘーベルや鉗子等を使用せず、歯周組織への侵襲を最小限に抑える！！

特にこのような症例で大変有効です

- 歯冠崩壊(残根)の抜歯
- インプラントの即時埋入時の抜歯
- Ridge Preservation時の抜歯
- 歯根骨折の抜歯
- 審美性を求める、特に前歯の抜歯
- 矯正時の便宜抜歯
- ヘーベルや鉗子等の器具の使用が困難な時
- 骨壁が薄い歯牙の抜歯
- 歯牙移植の再植
- ヘミセクション

FO005-0000
キット標準価格
¥198,000(税抜)



ECR Easy Crown Remover

クラウン等の補綴物を撤去する際、補綴物の咬合面に小さな穴をあけるだけで撤去が可能!



過剰な歯質の削除が回避可能

TEKとしての再利用も可能

金属粉による不快感、誤飲リスクを軽減

歯肉損傷のリスクを削減


FO006-0000
キット標準価格
¥70,000(税抜)



iBrush

インプラント周囲炎の予防・治療にはアイブラッシュ
Perfect Cleanse

インプラント体の表面に付着した頑固な歯石・バイオフィルムを素早く、綺麗に除去するブラシです。

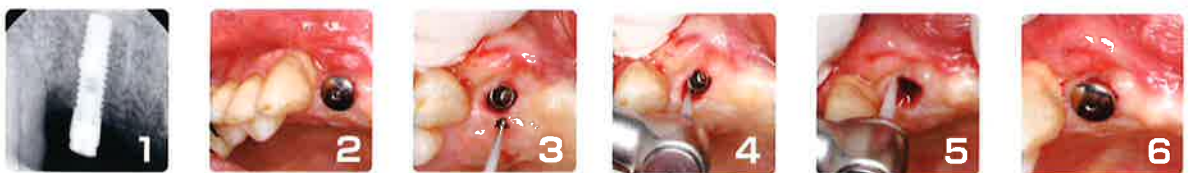

小さなヘッド部分がアプローチを容易にしました。 表面を傷つけず、ラフサーフェイスは維持します。

骨吸収量が2mm以下であればフラップレスでの使用も可能。

FO007-0000 標準価格 10本入り ¥15,000(税抜)

お問合せ・ご注文

(株)プラトンジャパン
PLATON JAPAN

TEL : 0120-36-8950
FAX : 0120-36-8952

本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル
営業所 大阪・名古屋・九州

製造販売元



(株)フォレスト・ワン
Forest-one

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-32-5
TEL : 047-474-8105 TEL : 047-474-8106