

トランスファーコーピング Pro (CL)


Type Pro専用の既製トレー用印象コーピングです。

トランスファーコーピング Pro CL

専用スクリュー




セットツール

組み合せ図

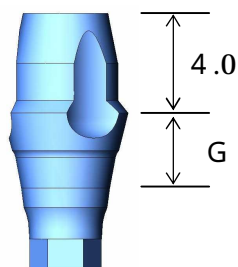

(S) G=3.0 mm

(L) G=6.0 mm

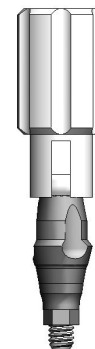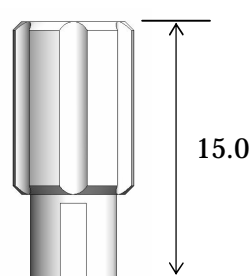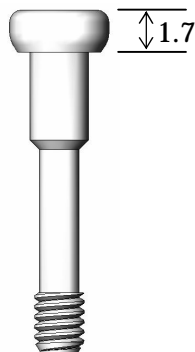

(操作手順)

トランスファーコーピング Pro CL をフィクスチャーに装着します。

専用スクリューをセットツールで締め、トランスファーコーピング Pro CL をフィクスチャーに固定します。クローズドトレーを用い印象採得を行います。

フィクスチャーから外したトランスファーコーピング Pro CL に、トランスファーレプリカ Pro を装着します。レプリカと一体になったトランスファーコーピング Pro CL 方向に注意しながら印象内面へ戻します。通法に従い作業模型を作製します。


▶ 操作方法の流れをホームページでご覧頂くことができます。(wmv ファイル)
http://www.platonjapan.co.jp/pro_cl.wmv



ご注意：印象精度を高めるため、必ずシリコン印象材をご使用下さい。

(参考)

S サイズ (G = 3.0) でのトランスファーコーピング Pro (CL) とトランスファーコーピング Pro (OP) のサイズ比較

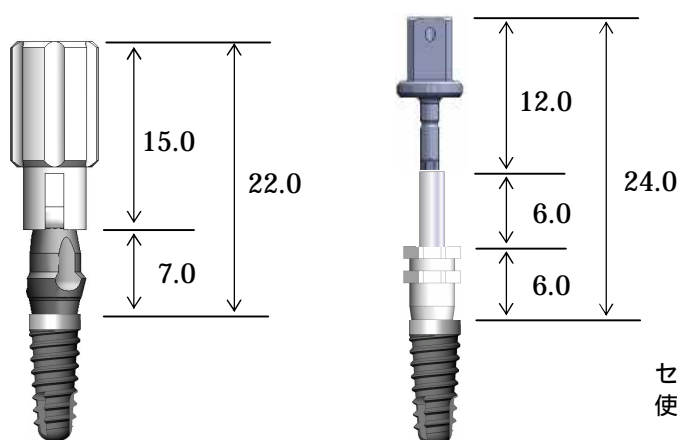

セットスクリュー H12・ヘックスドライバー SS 使用の場合

	商品コード	価格
トランスファーコーピング Pro (CL) S	TCL-P300	8,000 円/セット
トランスファーコーピング Pro (CL) L	TCL-P600	8,000 円/セット
セットツール	4CL-1500	9,000 円/本