

トランスファーコーピング Pro(OP)


インプラントボディType “Pro”のオープントレー用印象コーピング「トランスファーコーピングPro(OP)」について、フィン部と隣在歯の高さが一致し手指でコーピングを把持しにくいケースや、歯肉の厚いケースに対応可能なG = 9.0を新たに追加ラインナップ致しました。

医療機器製造販売届出番号 20B1X00007000041

歯科インプラント補綴用器具 (一般医療機器)

販売名 トランスファーコーピング Pro (OP)

製造販売元 株式会社 ヨシオカ

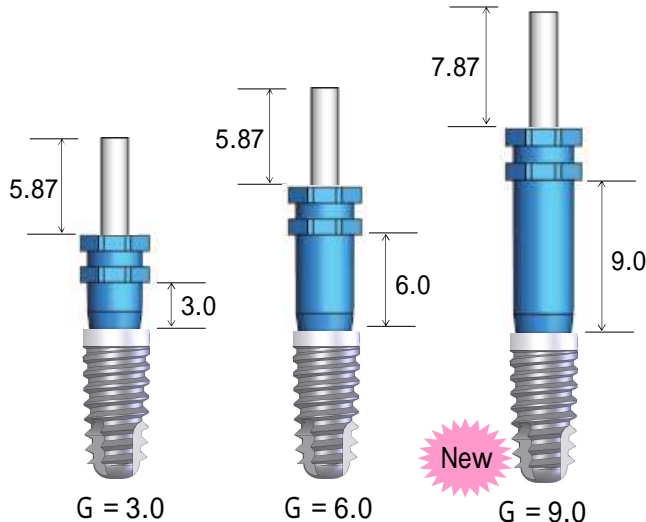

⚠️ ご注意

- ・印象採得時及びトランスファーレプリカの装着時は、インターナルヘックス(六角構造)がしっかり嵌合していることを確認して下さい。
- ・インプラントへの装着時は、ヘックドライバーでセットスクリューがとまるまで軽く回して下さい。ラウンドドライバー等により強く締め付けると、インプラントと強く嵌合し、印象内に取り込めない場合がありますので、ご注意下さい。
- ・開口量等の問題がある場合は、セットスクリューのサイズを短いものに変更してご使用下さい。

トランスファーコーピング Pro (OP)

サイズ	商品コード	付属セットスクリュー	価格
G = 3.0	TOP-P300	セットスクリュー-H12	8,000 円
G = 6.0	TOP-P600	セットスクリュー-H15	8,000 円
G = 9.0	TOP-P900	セットスクリュー-H20	8,000 円